



Hav altid Giftsuger[®] ved hånden: i haven, sommerhuset, fisketasken, bilen, på terrassen eller omkring halsen på gåture.
Klinisk testet med positiv effekt overfor myggestik, bi- og hvepsestik. Benyttes op til 24 timer efter stikket.

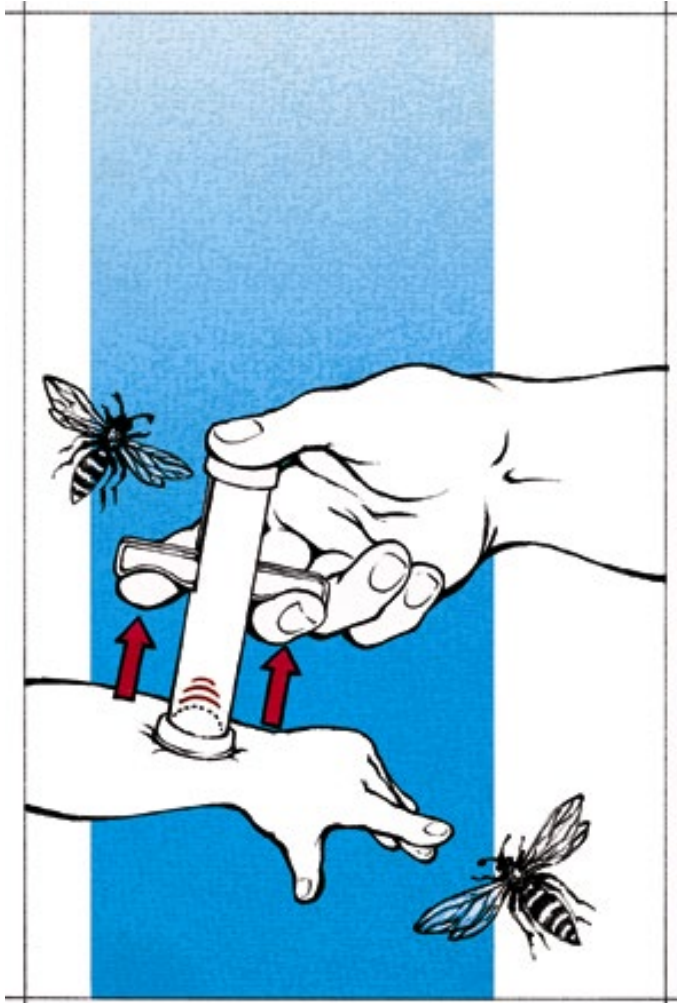

1) Giftsuger[®] fjerner giften og ikke kun smerten, og derfor oftest al ubehag.

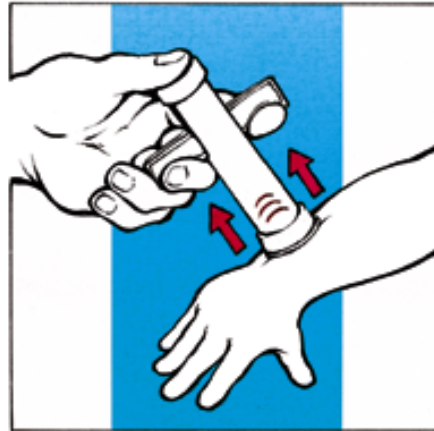

2) Sæt pumpen på stikket og træk opad med kun en hånd.



3) Vend mundstykket ved brug på mindre steder eks. fingre. Ved et stik fra en bi kan enden af tværpinden benyttes til af skrabe brodden af først.

CE